

呼出履歴管理

呼出履歴

呼出履歴は、日時や呼出種別のほか、対応した看護師さんの名前や処置内容も残せます。

呼出履歴分析



呼出の頻度をグラフで表示します。時間帯や患者さん、呼出種別など、条件の絞り込みが可能です。

録画再生



IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は録画再生が可能です。

巡視履歴管理

復旧ボタンを長押し



ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認のほか、記録として残せます。

トレース機能 (ベッド移動履歴)

例



感染症の患者さんが転床した履歴をさかのぼって確認できます(ユニット単位で1日24個の時刻設定、過去約6ヶ月前まで)。感染症の発症時に同室だった患者さんも確認が可能です。

ベッドシミュレーション機能 (ボード型PC親機、卓上型PC親機 (24型縦、24型横、32型横) のみ)



重症患者や感染症患者など、どのベッドに入院させるかを事前に検討できます。シミュレーション結果をもとに、自病棟の入床患者数や、チーム別の受け持ち患者数を一覧で確認することも可能です。

※病院用システムのみ対応します。卓上型PC親機 (19型タッチパネルモニター) に本機能はありません。同一ユニット内で入退院する患者さんが対象です。