

**ご注意****ネットワークに関する制約事項**

- 無線通信を経由するとセキュリティや通信速度遅延などにより正常に動作しない場合があるため、有線LANを推奨。
- DHCPやステートレス自動設定によるIPアドレスの自動割付の有無により、ネットワーク設定の手順や方法が異なる。
- IPv4でDHCPによるIPアドレスの自動割り振りを行う場合は、DHCPサーバーで各端末に固定のIPアドレスを割り振るように設定すること。
- 納入先のネットワーク管理状況に応じて、ネットワーク管理者との打合せや設定作業が必要になる。
- 故障時にシステムの設定データを復元する目的のため、機器すべての設定データを大切に保管すること。データの保存時にファイル名が同じにならないよう、注意が必要。
- 本システムで使用するプロトコル:IPv4、IPv6、TCP、UDP、SIP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、MLD
- ネットワーク環境により、動作に遅延が発生する場合がある。

- ネットワークを経由した映像出画やページングに時間がかかる場合がある。

- ネットワークの環境などにより音声、映像の途切れや遅延、フレームレート低下など正常に動作しない場合がある。
- IPv4とIPv6の端末は同一システム内で混在できません。

- WEB設定のネットワークカメラ検索や映像や音声にマルチキャストを使用する場合はIGMPv3/MLDv2を拒否されない環境が必要。

制約事項

- パソコン(市販品)によるシステム設定が必要。
- 拡声自動互通話方式の場合は、相手側の通話音/周囲環境などにより自然な会話ができない場合がある。
- 該当のドアホン端末が呼出中、通話中は、そのドアホン端末に対してのモニタリングは不可。
- 通常呼出中に優先呼出が行われると、優先度により映像が切替される場合がある。
- システム構成により、モニター付インターホン端末で応答した場合に、通話を開始するまで時間がかかる場合がある。
- システム更新をしている間は、機器の操作はできない。

- 1 オスカルシステム
2 ナース
3 NXシステム
4 ハンディターミナル
5 センサー・マグネットマーク
6 シンディニアース

- 7
8 ナースコール
9 FAGUS
10 緊急通報装置
11 NoteLinker
12 について